


DEVILBISS IGO® 便携式供氧系统，型号
306DS 快速入门指南



 危险：禁止吸烟

1. 请阅读重要的安全措施，并遵循本产品及操作指南中的全部警告和注意事项。请遵循所有的操作说明。
2. 将iGo 放置在合适的地方。
3. 确保空气滤清器已安装在手柄腔内。
4. 选择电源：
交流操作 – 将电源线一端插入 iGo，另一端插入壁装电源插座中。
直流操作 – 将电源线插入 iGo。将电源线接入直流电源端口之前，启动汽车。
充电电池 – 将电池两极插入电池槽的插槽内，然后将电池推进 iGo，使其固定住并与本设备后部平齐。
注意：在第一次使用iGo前，你必须安装电池，将电池完全放电后并完全充电。
 1. 请只使用电池供电，直到电池完全耗尽时再操作iGo。该设备将关闭，并将响起停电警告。
 2. 连接交流电源线并插上电源对电池完全充电。连续充电最多需要 4.5 小时。若电池连接到直流电源端口上，则无法进行充电。
5. 将管道连接至氧气出口端和插管。
6. 按住“电源”按钮，启动 iGo。
7. DeVilbiss iGo 即可使用。将标准鼻管佩戴在鼻子和面部。借助插管正常呼吸。
8. 选择输送模式 – 按下“模式选择”按钮。iGo 将遵循上次使用的模式和流量设置。
 - a. 持续流 – 持续供应的氧气将流经管道和鼻管。
 - b. PulseDose® – 呼吸一次，释放一次氧气。
9. 检查流速 – 使用“流速设置”按钮将流速调整到医生要求的设定。注意：DeVilbiss 提供商可能已经设好流量，因此无法进行调节。
10. 使用完 iGo 之后，请按住“电源”按钮关闭本设备。不使用 iGo 时，请将其储存在干燥、凉爽的地方。

DeVilbiss Healthcare LLC • 100 DeVilbiss Drive • Somerset, PA 15501 USA
800-338-1988 • 814-443-4881 • www.DeVilbissHealthcare.com