

**DEVILBISSIN KANNETTAVA IGO® -HAPPIJÄRJESTELMÄ,
MALLI 306DS PIKAOPAS****FI** **VAARA - EI SAA TUPAKOIDA**

- 1. Lue tärkeät turvatoimet ja noudata kaikkia käyttöoppaan ja tuotteen varoituksia ja varotoimia. Noudata kaikkia käyttöä koskevia ohjeita.**
2. Aseta iGo-happijärjestelmä sopivaan paikkaan.
3. Varmista, että ilma-suodatin on asennettu kahvan syvänteeseen.
4. Valitse virtalähde:
Verkkovirta - kytke virtajohto iGo-happilaitteeseen ja pistorasiaan.
Tasavirta - kytke virtajohto iGo-happijärjestelmään. **KÄYNNISTÄ AJONEUVO ENNEN VIRTAJOHDON KYTKEMISTÄ TASAVIRTAPORTTIIN.**
Ladattava paristo - aseta paristokiinnikkeet paristolokeron loviin ja työnnä paristoa sisään iGo-happijärjestelmään kunnes se on kunnolla paikallaan ja kiinni järjestelmän takaseinässä.
HUOMAUTUS - Ennen iGo-happijärjestelmän käyttämistä ensimmäistä kertaa paristo on asennettava, tyhjennettävä kokonaan ja ladattava sen jälkeen kokonaan.
 1. Käytä iGo-happilaitetta ainoastaan paristoteholla, kunnes se on kokonaan tyhjä. Laite sammuu ja antaa virtakatkoshälytyksen.
 2. Kytke verkkovirtajohto pistorasiaan ja lataa paristo kokonaan. Pariston lataaminen keskeytyksettä voi kestää jopa 4,5 tuntia.
Paristo ei lataudu, kun järjestelmä on kytkettynä tasavirtaporttiin.
5. Yhdistä letku hapen ulostuloporttiin ja kanyyliin.
6. Käynnistä iGo-happijärjestelmä pitämällä virtapainiketta painettuna.
7. DeVilbissin iGo-happijärjestelmä on nyt käyttövalmis. Kiinnitä vakiomallinen nenäkanyyli nenällesi ja kasvoillesi. Hengitä normaalisti kanyylin kautta.
8. Valitse annostelutila - paina tilapainiketta. iGo-happilaitte on käynnistettäessä viimeksi valitussa annostelutilassa ja viimeksi käytetyllä virtausnopeusasetuksella.
 - a. Jatkuva virtaus - happea virtaa jatkuvasti letkun ja nenäkanyylin kautta.
 - b. PulseDose® - happipurske annostellaan jokaisen hengityksen yhteydessä.
9. Tarkasta virtausnopeus - jos virtausnopeutta on säädettävä lääkärin määräämälle tasolle, muuta asetusta virtausasetuspainikkeilla. **HUOMAUTUS** - DeVilbissin laitetoimittaja on voinut säätää virtauksen niin, ettei sitä voi muuttaa.
10. Kun olet lopettanut iGo-happijärjestelmän käytön, sammuta se pitämällä virtapainiketta painettuna. Säilytä iGo-happijärjestelmää viileässä ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.

DeVilbiss Healthcare LLC • 100 DeVilbiss Drive • Somerset, PA 15501 USA
800-338-1988 • 814-443-4881 • www.DeVilbissHealthcare.com