



## CS PROVOZ VAŠEHO IGO® 2 POC



### NEBEZPEČÍ-ZÁKAZ KOUŘENÍ



Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny a dodržujte všechna varování a upozornění na výrobku a v návodu k použití. Dodržujte všechny provozní pokyny. Další podrobnosti naleznete v části Obsluha.



### DŮLEŽITÉ

Před prvním použitím zařízení na napájení z baterie musí být baterie plně nabitá. Podrobnosti viz První nabití baterie.

1. Vložte baterii. Připojte koncentrátor ke střídavému nebo stejnosměrnému napájení. Aby zařízení fungovalo, musí být nainstalována baterie.
2. Připojte hadičky kanyly k výstupu kyslíku.
3. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete koncentrátor.
- ❗ **POZNÁMKA**– Když je koncentrátor iGo2 zapnutý, na displeji se na 1 sekundu zobrazí nabití baterie v procentech, než se změní na obrazovku předpisu.
4. K nastavení předpisu použijte tlačítka „+“ nebo „-“.
5. Chcete-li zařízení používat v režimu SmartDose, stiskněte současně tlačítka „+“ a „-“.
6. Připojte standardní nosní kanylu k nosu a obličej. Přes kanylu dýchejte normálním způsobem.
7. Po ukončení používání zařízení stiskněte a podržte tlačítko Napájení, dokud se koncentrátor nevypne.