

עב הפעלת IGO2 POC שלך



סכנה - אין לעשן

קרא את אמצעי הבטיחות החשובים וציית לכל האזהרות וההתראות במוצר ובמדריך ההוראות. ציית לכל הוראות ההפעלה. עיין בסעיף 'פעולה' לקבלת פרטים נוספים.

חשוב לפני השימוש במכשיר כאשר הוא מופעל באמצעות סוללה בפעם הראשונה, יש לטעון את הסוללה במלואה. עיין בסעיף 'טעינת סוללה פנימית' לקבלת פרטים.

1. התקן את הסוללה. חבר את המחולל למתח AC או DC. הסוללה מוכרחה להיות מותקנת כדי שהמכשיר יפעל.
2. חבר צינורית לפתח יציאת החמצן.
3. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המחולל.
4. **הערה** – כאשר iGo2 מופעל, התצוגה מציגה את אחוז הסוללה למשך שנייה אחת לפני המעבר למסך המרשם.
5. השתמש בלחצנים «+» או «-» כדי להגדיר את המרשם שלך.
6. כדי להשתמש במכשיר במצב SmartDose[®], לחץ על «+» או «-» בו-זמנית.
7. חבר צינורית אף רגילה לאפך ולפניך. נשום בצורה רגילה דרך הצינורית.
8. לאחר שסיימת להשתמש במכשיר, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי עד לכיבוי המחולל.